

Ce que vous voyez.

Ce que vous entendez.

Ce que vous faites.

Messages affichés sur l'écran LCD:

Messages de texte

Décompte des chocs

Temps écoulé

Tracé ECG

Commencer ici

Perte de connaissance - suspicion d'arrêt cardiaque.

Appareil prêt.

Allumer l'appareil.

Auto-test : appareil prêt.

Autres messages vocaux éventuels:

Brancher le câble.

Appareil hors service.

Relâcher le bouton de choc.

Remplacer les piles.

Ce que vous devez faire :

Connecter le câble de l'électrode.

Éteindre puis allumer l'appareil. Si l'appareil est toujours hors service, commencer la réanimation.

Relâcher le bouton de choc.

Remplacer les 10 piles.

(n) chocs délivrés

Le témoin lumineux clignote.

Vérifier l'état de conscience.

Secouer la personne et l'interpeller.

Le témoin lumineux clignote.

Demander de l'aide.

Demander de l'aide (envoyer quelqu'un le cas échéant).

Le témoin lumineux clignote.

Ouvrir les voies respiratoires.

Soulever le menton et faire basculer la tête en arrière.

Option: Placer le système de réanimation passive PASS (Passive Airway Support System) sous les épaules pour basculer la tête. NE PAS utiliser le système PASS en cas de suspicion de traumatisme crânien ou cervical.

Si la personne n'est pas consciente, dégager les voies respiratoires.

Le témoin lumineux clignote.

Vérifier la respiration.

Pratiquer deux insufflations.

Vérifier la respiration.

Regarder si le thorax de la personne se soulève.

Écouter s'il y a une respiration. Sentir sur votre peau l'air expiré.

Regarder si la respiration reprend, si la personne tousse ou bouge.

Si la victime ne respire pas, Pratiquer deux insufflations, 1 seconde par respiration (Directives AHA 2005 uniquement).

Le témoin lumineux clignote.

Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient.

Appliquer les électrodes adulte ou nourrisson/enfant sur la poitrine nue du patient.

Suivre les instructions de l'emballage des électrodes.

Placer les électrodes comme indiqué chez les patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg.

Le témoin lumineux clignote.

Commencer la réanimation.

Effectuer une RCR: 2 insufflations toutes les 30 compressions.

Après un choc...

Le témoin lumineux clignote.

Choc conseillé.

Ne pas toucher la victime.

Appuyer sur le bouton de choc clignotant

Message de mise en garde **RECELEZ-VOUS..**

NE PAS toucher la victime !

Appuyer sur le bouton.

Choc délivré.

Le témoin lumineux clignote.

Ne pas toucher la victime.

Analyse en cours.

Après 2 minutes de RCR...

Arrêter la réanimation.

Choc déconseillé.

